

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

Beskrivelse

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT er et bruksklart, flytende desinfeksjonsmiddel for profesjonell og privat bruk. Den løsemiddelfrie formuleringen er fremragende, helt **uten tilsvarende farepiktogrammer** og med samtidig høy effektivitet. Som en vannholdig natriumhypoklorittløsning er den ideell for små og store overflater, som gulv, bord, møbler, senger eller dører. Den brukes til hygienisk rengjøring og desinfisering mot bakterier, sopp og virus, og er derfor **bakteriedrepende, gjærdrepende og virusdrepende**, noe som gjør den ideell for sykehus, legepraksiser, rengjøringsmiddel i bygninger, omsorgstjenester eller andre foretak og profesjonelle brukere for å beskytte helsen til ansatte og besøkende. Når det brukes vekselvis med rengjøringsmidler og pleieprodukter, kan det **også brukes på parkettgulv**.

Den alkoholfrie formuleringen av Brilliance MedicalSurface Disinfectant gir også to store fordeler i forhold til produkter basert på alkohol:

1. Brannfaren på grunn av bruk av alkoholer på store flater er helt eliminert her.
2. Det oppstår ingen skader på overflater grunnet alkohol.

Made in Germany.

Sertifikater / Godkjenninger



ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

BauA reg.nr.: N-96370 – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Den tyske forbundsrepublikkens institutt for arbeidervern og arbeidsmedisin)

VAH sertifisering – Overflatedesinfeksjon som profylakse i sykehus og praksis

Dermatest-sertifikat – Dermatologiske tester på mennesker (epikutantest / allergitest)

EN 16615 – Anvendelse med Berger-Seidle Wischwiesel er i samsvar med 4-felts prøvingen i henhold til EN 16615.

Avfallskode: 140603

Innhold / beholder leveres til industrielt forbrenningsanlegg

Spesiell informasjon

Desinfeksjonsmiddelet må brukes forsiktig. Les alltid etiketten, sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er spesielt egnet for store overflater.

Vi anbefaler produktet BRILLIANCE MEDICALCLEANER for stoler, bord, disker / benker, håndtak, rekkverk eller treningsutstyr der brukerne bytter ofte og raskt. Ved behov skal det utføres en test for materialkompatibilitet på et ikke synlig sted.

Innhold av aktivt stoff:

<0,25 % flytende, vannholdig natriumhypoklorittløsning (Aktivstoff: Aktiv klor, frigjort av hypoklorsyre, CAS 7790-92-3)

Virkning:

Brilliance Medical Surface er sertifisert for å være effektiv mot virus, bakterier og gjærsopp. 99,999 % av virus, bakterier og sopp inaktiveres eller drepes.

Virketid:

Minst: Bruk en tilstrekkelig mengde i 5 minutter slik at den behandlede overflaten holdes fuktig i mer enn 5 minutter. Etter 5 minutter kan den tørkes av med en tørr, ren klut.

Bruksområder:

Produktet påføres ufortynnet på overflatene (50ml/m² skal ikke overskrides). For å være effektiv mot virus, bakterier og sopp, må den påføres på ikke-skitten, tørre overflater. Hvis overflaten er skitten, må den rengjøres før den desinfiseres. Minste kontakttid er 5 minutter. I tilfelle den er forurenset med sopp, la den virke i 15 minutter og tørk av med en ren klut. Vær oppmerksom på materialkompatibilitet.

Ved bruk på parkett og tregulv må man, i tillegg til virketiden som er angitt her, også akte på at produktet påføres fuktig for å unngå en svelling eller en vannskade. Tørk av gulvet med en ren klut etter 5 minutter. Tidsintervallet mellom hver enkelt anvendelse bør ikke være for nær, da overdreven desinfisering kan skade lakkfilmen på lang sikt. Avhengig av bruksområde kan intervallet på 1-2 uker velges som orientering. På parkett- og gulvflater anbefaler vi vekselvis bruk med BRILLIANCE NEUTRALCLEANER, samt regelmessig fullstendig vedlikehold med BRILLIANCE EVERCLEAR eller, for oljede gulv, BRILLIANCE AQUA OILCARE. I tillegg må de relevante anvisningene om rengjøring og vedlikehold av parkettgulv følges. Alt i alt tjener dette til å desinfisere samt beskytte og opprettholde verdien av gulvflatene.

Type og varighet av anvendelsen:

Produktet påføres overflaten uten fortykning ved hjelp av Berger-Seidle Wischwiesel, en håndsprayflaske eller med en svamp eller mopp og bøtte. Bruk en tilstrekkelig mengde av den ferdige løsningen for å holde de behandlede overflatene fuktige under hele virketiden. Sørg for en god ventilasjon under bruken.

La produktet tørke ordentlig når gulvet desinfiseres.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT er beregnet på rom der mennesker og dyr oppholder seg, ikke for direkte kontakt med næringsmidler og førstoffer. Unngå kontakt med klær. Avhengig av kvaliteten på klærne kan det forekomme misfarging. Vi anbefaler passende arbeidsklær for sikkerhets skyld.

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT

Lagring / transport

BRILLIANCE MEDICALSURFACE DISINFECTANT har en holdbarhet på ett år uåpnet. Må ikke utsettes for varme. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig godt ventilert sted, < 25 °C. Beskyttes mot ultrafiolett lys og sollys.

Generell informasjon

Før du bruker dette produktet må bruksanvisningen og sikkerhetsdatabladet leses og følges nøye. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut brukerens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Førstehjelp: Generelt: Tilsølte klær må fjernes straks. Etter innånding: Hvile, frisk luft, legehjelp. Etter hudkontakt: Skyll grundig med vann og såpe. Etter øyekontakt: Skyll grundig under rennende vann i minst 15 minutter med åpne øyelokk, kontakt øyelege. Etter svelging: Skyll munnen straks og drikk deretter 200-300 ml vann, legehjelp. Informasjon for legen: Behandles symptomatisk (dekontaminasjon, vitale funksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.